

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

STERILIZATOR PUPINEL CU AER CALD

Specificatii Tehnice:

- **Pachetul Dimensiune** : 37 * 25 * 24 CM.
- **Volumul intern** : 1.8 L.
- **Greutate bruta**: 4.20 kg.
- **Timer**: 60 minute reglabil.
- **Temperatura**: 20-250 ° C reglabil.
- **Tensiune** : 220V - 240V / 50Hz.
- **Putere** : 500 W.
- **Culoare** alba

Va rugam sa cititi specificatiile inainte de a utiliza produsul.

Sterilizatorul are rolul de a ucide bacteriile de pe diverse instrumente de lucru .
Acest aparat trebuie folosit in spatii bine ventilate.
Instrumentele trebuie sa fie bine uscate inainte de a fi introduse in aparat.
Verificati ca toate materialele care intra in compozitia instrumentelor pot suporta temeperaturi ridicate.

Utilizare:

Dati jos foliile de protectie de plastic de pe cele doua tavite din interiorul aparatului. Conectati sterilizatorul in priza corecta (verificati sa corespunda cu indicatiile tensiunii din spatele aparatului). Puneti obiectele sau instrumentele in interiorul sertarului destinat sterilizarii pentru a le dezinfecta. Trebuie sa va asigurati ca usa este inchisa inainte de pornirea sterilizatorului.

Se regleaza timpul de sterilizare, din butonul " TIME SETTINGS", timpul crescand cu 5 minute la fiecare apasare. Timpul maxim de sterilizare este de 60 minute. După ce ați setat timpul potrivit sterilizării, începeți setarea temperaturii corespunzătoare prin apasarea butonului " TEMPERATURE CONTROL".

Dupa setarea timpului si temperaturii, indicatorul luminos clipeste de 5 ori, iar sterilizatorul intra in starea de incalzire automata si incepe numaratoarea inversa a timpului de sterilizare..

Prin apasarea butonului MENU se verifica timpul de sterilizare setat. Temperatura de lucru va fi afisata pe ecranul LED al aparatului.

Daca se doreste resetarea timpului si a temperaturii , se apasa butonul ROSU "RESET KEY"

La terminarea ciclului de sterilizare asteptati ca temperature sa ajunga la minim 30 grade , apoi ridicati tavita cu ajutorul inelelor, pentru a evita arderea.

DECONNECTATI aparatul atunci cand nu il folositi, pentru a preintampina posibilitatea unui incendiu.

Sterilizare:

Presterilizarea presupune cufundarea instrumentelor în soluție dezinfectantă. astfel, după fiecare folosire, instrumentele metalice trebuie spălate și introduse într-un vas cu soluție antiseptică, în care vor fi lăsate timp de aproximativ 15 minute. În acest caz, sunt foarte utile soluțiile pe bază de formaldehidă, fenoli, aprobate de Ministerul sănătății.

După respectarea timpului optim de acționare a acestui dezinfectant, instrumentele trebuie spălate minuțios cu perii adecvate, insistându-se la încheieturi, la canalurile acestora și frezelor, pentru înlăturarea tuturor formelor de materii organice.

După aceasta urmează sterilizarea instrumentelor, care se face prin metode fizice. Cele fizice presupun căldură uscată (sterilizarea prin aer cald în pupinel – la 180 de grade, timp de 30 minute).

Intretinere:

Curatati in mod regulat aparatul cu lavete din bumbac imbibate in alcool. Nu folositi niciodata produse de curatare industriala sau diferiti solventi,
Aparatul trebuie asezat intr-un loc uscat.

ATENTIE:

Copiii nu au voie sa utilizeze acest aparat.
A se utiliza doar la tensiunea indicata, altfel puteti cauza incendii.
Dupa curatarea aparatului asigurati-va ca acesta este bine uscat inainte de a fi folosit.
Nu folositi aparatul cu mainile ude.
Este interzisa utilizarea in spatii cu umiditate ridicata.

Importator: S.C. Marilar Dinamic Consulting S.R.L.
Str. Calea Crângași nr. 58, Sector 6, București, România
Tel: 0765 516 000

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Denumire produs: Sterilizator cu aer cald (tip pupinel)

Destinație: Sterilizarea instrumentelor metalice utilizate în saloane de coafură, cosmetică, manichiură și pedichiură

Declarăm pe propria răspundere că produsele introduse pe piața Uniunii Europene de către societatea noastră, sunt conforme cu cerințele esențiale de siguranță și funcționare prevăzute de legislația Uniunii Europene aplicabilă.

Prezenta declarație este emisă pe baza documentației tehnice furnizate de producător și a certificatului de conformitate emis de organismul notificat DEKRA (Notified Body nr. 1347), Certificat nr. NL-43357.

Standardele armonizate aplicate

- EN 55014:2006 + A1:2009 + A2:2011
- EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Directivele Uniunii Europene aplicabile

- Directiva 2014/30/UE – Compatibilitate electromagnetică (EMC)
- Directiva 2014/35/UE – Echipamente electrice de joasă tensiune (LVD)

Prin prezenta, S.C. Marilar Dinamic Consulting S.R.L. își asumă întreaga responsabilitate pentru conformitatea produselor menționate cu cerințele legislației Uniunii Europene.

Locul emiterii: București, România

Data: _____ / FACTURA :

Semnătura și ștampila:



CERTIFICAT GARANTIE

Garanția produselor se asigură în conformitate cu Legea Nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată (r1), OG 21 / 1992 privind protecția Consumatorilor, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare de la data vânzării, Legea 476/2006 și normele de aplicare în vigoare la data vânzării, completate cu prevederile Certificatelor de Garanție și ale Instrucțiunilor de Utilizare ale produsului, predate la data achiziției acestuia.

Perioada de garanție se prelungește cu timpul de nefuncționare al produsului, scurs de la data predării acestuia pentru reparare și până la data repunerii în stare de funcționare și a notificării în scris a consumatorului despre acest lucru. Prolungirea termenului de garanție se va înscrie în Certificatul de Garanție de către prestatorul de servicii autorizat care a efectuat reparația în perioada de garanție.

Produsele au în componență subansamble electronice și mecanice care necesită respectarea cu strictețe a condițiilor de manipulare, transport, păstrare, exploatare, conectare, întreținere și reparare prevăzute în Manualul de Utilizare.

Consumatorului i se garantează că pe durata perioadei de garanție, în condițiile normale și specificate de utilizare a produsului, în cazul apariției neconformităților, acestea vor fi înlăturate în primul rând prin reparare sau, după caz, prin înlocuire, reducere de preț sau restituirea contravalorii, în conformitate cu legislația mai sus amintită.

Soluționarea garanției se face în maxim 15 zile calendaristice.

Neaplicarea garanției

Nu constituie obiectul garanției lipsa de conformitate derivată din:

- utilizarea produsului în aplicații ce necesită performanțe și calități altele decât cele oferite de clasa și scopul pentru care este destinat produsul sau în afara specificațiilor tehnice aferente;
- uzura normală a produselor (ex. uzura fizică, mecanică și electrică)
- utilizarea produsului în condiții neadecvate (ex: tensiune de alimentare necorespunzătoare, împământare inexistentă sau greșită, acțiunea șocurilor, vibrațiilor, loviturilor sau altor forme de abuz fizic, utilizarea produsului în condiții de mediu necorespunzătoare acțiuni ale substanțelor chimice, noxe, fum, praf sau umiditate);

RETURURI

Produsele achiziționate la distanță se pot returna conform O.U.G. 34/2014. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului sau, în cazul presterilor de servicii, de la încheierea contractului. Returnarea produselor se va face pe cheltuielile clientului, în termen de 14 zile de la denunțarea contractului. Se recomandă utilizarea aceluiași serviciu de transport utilizat pentru recepționarea produselor

Se va înapoia contravaloarea comenzii, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea produsului returnat. Contravaloarea transportului NU se returnează (Cf. art.59, pct.2 din OUG 34/2014 - "Utilizatorul final suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor"), dacă returul s-a produs din motive ce nu tin de un eventual defect al produsului.

Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). Nu se accepta pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgărieturi, socuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc.

Prevederile OUG 34/2014 se aplică doar consumatorului definit ca orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații așa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 OG 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Eventualele probleme care fac obiectul certificatului de garanție pot fi sesizate telefonic la nr 0765516059/ 0765516000 sau prin e-mail : comenzi@cosmetics.ro

FACTURA : /

GARANȚIE : 12 LUNI

VANZATOR



CUMPARATOR,